

Fertism

フェルティズム
女性向け温度計取扱説明書



Fertism 温度計 各部名称



【Fertism 温度計 表面】

電源の入れ方

- ・約3秒間電源ボタンを長押しします。
- ・LEDが3回点滅すると電源ONの状態となります。

データの送信方法

- ・温度計が検知した温度データは、3分ごとに自動的に送信されています。
- ・手動でデータ送信をする際は、電源ボタンを1回押しします。
※専用アプリを開いてから電源ボタンを操作してください。

【LED点滅：1回】
専用アプリに温度データが正常に送信されました。

【LED点滅：2回】
専用アプリに温度データが送信できませんでした。
→再度アプリとの接続を確認し、電源ボタンを1回押ししてください。

バッテリー低下時

- ・バッテリー低下時(2.4V以下)はLED点滅が10回行われます。
- ・その際は新しい温度計をご購入いただき、再度アプリに温度計登録をしてください。

装着方法



※なるべく心臓に近い場所に装着してください。

※デバイスの裏面が直接肌に触れるように装着して下さい。

・電源がONになったことを確認後、上図のように表面を下着に接するように挟み込み、お好みでパッチを下着外面のマグネット部分に取り付けます。

【おすすめの装着箇所】

- ①上図のようにブラジャー、その他インナー左上部に挟み込む。
- ②左脇の下、インナーバックベルト部分に挟み込む。

※盛りブラなど分厚いブラジャーだとマグネットの機能が十分に機能せず、外れやすくなる場合があります。
その場合、②の装着箇所をお薦めします。

使用上の注意

■正しく安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。■

! 警告 下記の警告事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

- ・万が一、異常が発生したときは
本製品から異臭や煙が出た場合は、すぐに使用を中止してください。
その後はご使用にならず、販売店が当社のお問合せ窓口までご相談ください。
- ・分解しないでください
パッチの取り外し以外は、自分で分解や修理をしないでください。
感電や火災、やけど、故障などの原因になります。
- ・航空機の中など高度な安全が要求される場所では使用しないでください
計器類や計測機器などの誤作動の原因になる可能性があります。
- ・放射線や磁気による検査や治療を受ける場合は、必ずデバイスを取り外してください
放射線や磁気による治療や検査を受ける場合は、温度計デバイスを必ず取り外してください。故障や思わぬ事故の原因になります。

! 注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

- ・小さなお子様の手が届かないところに保管してください
誤飲など思わぬ事故をまねく恐れがあります。

- ・浴室やプールなど水気の多い場所で使用および保管はしないでください
- ・高温多湿を避けて涼しい場所で保管してください
保管する場所によっては品質が劣化する場合があります。
- ・ご使用する周囲の環境によっては正しく動作しない場合があります
本製品は無線通信機器です。周囲に他の無線通信機器がある場合は、電波干渉によって正しく動作しない場合があります。できるだけ他の無線通信機器がない場所で使用してください。

認証



211-201012

その他の事項

・この製品をお買い上げになった国以外で使用しないでください
各国の電波法関連の認証は製品を販売している国に適合した認証を受けています。
製品には販売される各国の電波法に定められた表示のみしています。他国で使用した場合は罰せられる可能性があります。

お手入れについて

製品のお手入れは水拭きまたは乾いた清潔な布やタオルで汚れを拭き取ってください。

廃棄について

本製品を破棄する場合は各地方自治体の条例やルールに従ってください。
本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。

保証規程

1. 保証期間

販売店発行のレシートに記載されている購入日より1年間、本製品を保証規定に従い、本製品を保証規定に従い無償修理することを保証致します。

2. 保証対象

保証対象は本製品の温度計デバイスのみとさせていただきます、その他の添付物は保証の対象となりません。

3. 保証内容

本製品添付の取扱説明書の記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4. 適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

- ・故障した製品をご提出いただけない場合。
- ・ご購入日が確認できる証明書（レシートや納品書等）をご提出いただけない場合。
- ・レシートまたは保証シールの所定事項（製品名やシリアルナンバー、その他）の未記入、あるいは改変が行われている場合。
- ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取扱いが適切でないために生じた故障、損傷の場合。
- ・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- ・弊社および弊社が指定する期間以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理によって故障した場合。
- ・本製品添付の取扱説明書に記載の使用方法、および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- ・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- ・本製品添付の取扱説明書に記載の動作/保管温度を超える環境により故障した場合。
- ・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5. 免責

本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何に関わらず、本製品の購入代金を限度とします。

6. その他

- ・レシートまたは保証シールの再発行は致しません。
- ・有償、無償に関わらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・製品修理にかかる付与費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担をおこないません。またご送付いただく際、定期利那梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（宅配や簡易書留等）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

7. 有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。